

Vivipharma<sup>®</sup> SpA  
presenta  
LA NOVITÀ DEL NUOVO MILLENNIO

JEUNESSE<sup>®</sup> O<sub>2</sub>  
COMPACT POWER



OSSIGENO DERMOINFUSIONE  
IL SEGRETO DELLA TUA GIOVINEZZA

# JEUNESSE® O<sub>2</sub>

## COMPACT POWER



- **ULTRAFUNZIONALE**
- **MINIMO INGOMBRO**
- **MASSIMA SILENZIOSITÀ**
- **MASSIMA POTENZA**

### **Jeunesse O<sub>2</sub> Compact Power**

Rappresenta la sintesi di due tecnologie sinergiche e complementari: l'Ossigeno Dermo Infusione e la Nanotecnologia dei Trattamenti Jeunesse O<sub>2</sub> per risolvere gli inestetismi legati all'invecchiamento globale del Viso, Corpo e Capelli.

### **Ossigeno Dermo Infusione**

È una tecnica di infusione percutanea di Ossigeno Concentrato tramite un sofisticato generatore che trasforma l'aria in Ossigeno Puro (>90%). Il trattamento determina un'eccezionale rigenerazione di tutta la cute del Viso, Corpo e Capelli con evidenti effetti anti-età. Ideale per chi preferisce non sottoporsi a iniezioni di filler o altri trattamenti più o meno invasivi.

### **Come agisce**

Riproduce a contatto con la pelle una sorta di camera iperbarica "in miniatura", che aumenta la micro circolazione sottocutanea, il metabolismo cellulare e i processi di detossinazione, riducendo visibilmente i segni dell'età. Aiuta la ricrescita naturale dei capelli rendendoli più sani, forti, lucidi e corposi.

### **Prodotti appositamente Formulati**

L'Ossigeno Dermo Infusione favorisce la veicolazione dei principi attivi funzionali nella pelle.

**Il segreto quindi non è solo nell'Ossigeno** ma nella sinergia con i prodotti appositamente formulati.

**I Trattamenti Nanotecnologici Jeunesse O<sub>2</sub> veicolabili negli strati più profondi della cute rappresentano quel segreto che fa davvero la differenza.**



# L'ARCHITETTO DELLA TUA PELLE

## Quali inestetismi tratta Jeunesse O<sub>2</sub> Compact Power

### **Viso:**

Invecchiamento cutaneo  
Rughe  
Lifting  
Rassodamento  
Tightening  
Macchie  
Acne  
Pelle impura  
Pelle sensibile

### **Corpo:**

Ringiovanimento mani  
Cellulite  
Adipe localizzato  
Smagliature  
Ipotonia  
Cicatrici

### **Capelli:**

Ringiovanimento capelli  
Diradamento  
Scarsa crescita  
Caduta  
Seborrea  
Forfora  
Desquamazioni  
Capelli fragili  
Cute sensibile  
Detossinante Cute

## **Trattamento Ossigeno Dermo Infusione O.D.I.**

**Durata della seduta O.D.I. 15 - 20 min**

**Numero sedute consigliate: 6 - 10**

**con cadenza settimanale**

**Proseguire con il Trattamento  
ad uso domiciliare**

## **Cosa si Ottiene**

**Aumento dell'Ossigenazione cellulare**

**Accelerazione Metabolica**

**Incremento dei processi di detossinazione**


**Rafforzamento delle difese della pelle**

**Veicolazione Attivi Nanotecnologici**



Vivipharma® SpA  
Laboratori di Ricerca

Via Guardia del Consiglio, 15 47891 - Galazzano (RSM)  
Tel. 0549 960550 (r.a.) - Fax 0549 900248  
[www.vivipharma.com](http://www.vivipharma.com) - [www.christiescosmetics.com](http://www.christiescosmetics.com) - [www.rephase.net](http://www.rephase.net)  
[vivipharma@omniway.sm](mailto:vivipharma@omniway.sm) - [divisione@christiescosmetics.com](mailto:divisione@christiescosmetics.com) - [divisione.cosmetics@rephase.net](mailto:divisione.cosmetics@rephase.net)

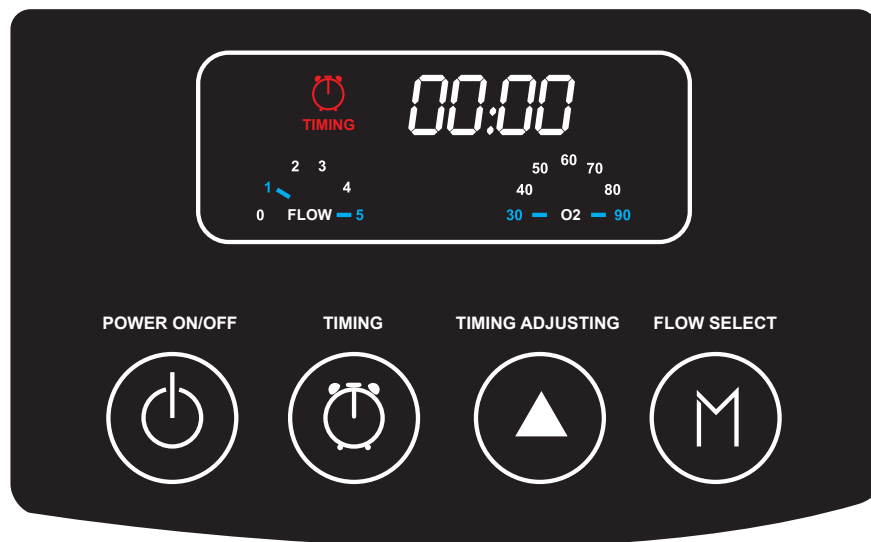

### TRATTAMENTO VISO O.D.I.

- Accendere Compact Power e attendere 4-5 min per il caricamento dell'O<sub>2</sub>
- Preparazione della Cute (Latte detergente + Lozione Tonificante)
- Non occorre struccare gli occhi



### ESECUZIONE DELLA FASE A:

#### Apertura dei pori cutanei

- Sulla cute pulita veicolare l'O<sub>2</sub> puro
- Flow select (1) per 5 minuti
- Regolare il flusso di O<sub>2</sub> in funzione della sensibilità del cliente, mantenendo l'aerografo a 1-2 cm di distanza dalla cute
- Evitare le palpebre



### ESECUZIONE DELLA FASE B:

#### Applicazione del Siero Trattamento

- Caricare nel serbatoio dell'aerografo il Siero Trattamento Jeunesse O<sub>2</sub> scelto in funzione della tipologia di cute
- Flow select (5) per 5 minuti
- Aprire l'ugello di miscelazione e nebulizzare dolcemente l'ossigeno e il siero eseguendo movimenti regolari



### ESECUZIONE DELLA FASE C:

#### Veicolazione degli attivi

- Terminata l'applicazione del Siero chiudere l'ugello di miscelazione e veicolare l'O<sub>2</sub> puro per favorire la penetrazione degli attivi in profondità
- Flow select (1) per 5 minuti
- Insistere maggiormente nelle zone dei segni d'espressione e delle rughe



**Importante:** alla fine di ogni trattamento pulire sempre il serbatoio dall'aerografo, versando acqua all'interno e nebulizzarla fino a completo svuotamento.



## DETERSIONE DELLA PELLE JEUNESSE O<sub>2</sub>

PRODOTTO	FUNZIONALITA'	INDICAZIONI
LATTE DETERGENTE DERMOELASTICIZZANTE	Estratti naturali con proprietà desensibilizzanti lenitive. Riduce la reattività della pelle sensibile.	Pelle Secca e Sensibile Pelle Disidratata
LATTEGEL DETERGENTE SEBOEQUILIBRANTE	Emulsione-gel non untuosa ricca in attivi biodisponibili dermopurificanti	Pelle Grassa e Intossinata Pelle Mista e Impura
LOZIONE TONIFICANTE IDRATANTE DERMOLENITIVA	Rivitalizzante elasticizzante a base di Dermo BSC, glucosidi, aminoacidi, fitoderivati	Pelle Secca e Sensibile Pelle Disidratata
LOZIONE TONIFICANTE SEBOEQUILIBRANTE	Purificante detossinante, rinfresca e protegge la cute dallo stress ossidativo	Pelle Grassa e Intossinata Pelle Mista e Impura

## I TRATTAMENTI JEUNESSE O<sub>2</sub>

PRODOTTO	FUNZIONALITA'	INDICAZIONI
TRATTAMENTO PURIFICANTE RIEQUILIBRANTE	Il complesso MMP e la catalasi-Fe dell'ematite amplificano la produzione di collagene, riequilibrando le difese della pelle	Pelle Grassa e Intossinata Pelle Mista e Impura
TRATTAMENTO NUTRIENTE	Svolge una intensa azione idratante, lenitiva; Baicalin-telomerasi, oro colloidale e tripeptidi antiage accelerano il rinnovamento cellulare	Pelle Secca e Sensibile Pelle Disidratata
TRATTAMENTO ALLE CELLULE STAMINALI VEGETALI	Cellule staminali vegetali e acido ialuronico cross-linkato stimolano il potere di autorigenerazione delle cellule della pelle promuovendo un immediato effetto filler	Pelle Devitalizzata Senescente Rugosa
TRATTAMENTO RASSODANTE	L'esclusivo H.T.Dermic agisce sull'architettura dermica e rilassamento tissutale riconquistando turgore, firmness, tonicità e compattezza	Pelle Devitalizzata Senescente Atonica

## CHIAVE DI "LETTURA"

ASPETTO COLORE	PORI	SEGNI	NECESSITA'	TIPO DI PELLE
Sano, luminoso senza untuosità evidenti	Appena visibili sulla parte centrale del viso	Non particolarmente evidenti	Mantenere idratazione nutrimento luminosità	NORMALE
Pelle Sottile con presenza di rossori	Appena visibili	Couperose	Ripristinare il film Idro-lipidico	SECCA SENSIBILE
Spento grigio olivastro opaco	Dilatati	Presenti con ipercheratosi	Illuminare nutrire detossinare	MISTA INTOSSINATA IPERCHERATOSI
Lucido	Ben visibili e pieni, punti neri, comedoni, acne	Talvolta arrossamenti	Sebo normalizzare Detossinare	GRASSA OLEOSA IMPURA
Tesa, sottile, trasparente, chiara, opaca anelastica	Assenti, talvolta comedoni nella zona zigomale	Orizzontali ed evidenti	Reidratare nutrire rigenerare rassodare	SEGNATA DEVITALIZZATA
Non compatto discromico opaco ispessito Macchie scure	Perlopiù assenti	Evidenti in più zone del viso Spesso verticali	Rigenerare rassodare illuminare	RUGOSA SENESCENTE ATONICA