

**rea** | **Azalea Family**



**ALBER COMPATIBILE**



**Inclinazione con compensazione**



**Basculamento a baricentro costante**



**Una grande famiglia con il nuovo schienale Flex3 e nuovi colori telaio**

Nel corso degli anni le carrozzine posturali/passive *Invacare*® *Rea* sono diventate una grande famiglia. La comprovata esperienza Svedese nel ricercare soluzioni posturali personalizzabili ha infatti portato a progettare e realizzare diversi modelli adattabili alle personali esigenze cliniche e posturali dei pazienti. Tutte le versioni hanno come denominatore comune il sistema DSS (**Dual Stability System**®): reclinazione dello schienale con compensazione in lunghezza del tronco e basculamento della seduta a baricentro costante. Questo sistema garantisce una riduzione delle forze di frizione sul tronco, una migliore distribuzione delle pressioni del corpo e una maggiore sicurezza del paziente quando basculato e reclinato al massimo.





Alle già affermate funzionalità che caratterizzano **Rea Azalea** e **Rea Azalea Assist**, si aggiunge ora il nuovo schienale Flex3, che rende queste carrozzine posturali ancora più adattabili alla fisicità dell'utente. Lo schienale Flex3 sia nella versione con scocca rigida che tensionabile è regolabile in larghezza (in maniera indipendente rispetto alla seduta), in altezza, allargato in maniera asimmetrica o ruotato (solo tensionabile) per creare maggior spazio a livello sacrale o scapolare. Flex3 permette di applicare sistemi di postura per il tronco anche complessi grazie ai tubi tondi dello schienale.


**Rea Azalea** e **Rea Azalea Assist** sono particolarmente indicate per gestire pazienti geriatrici o affetti da disturbi reumatologici o neurologici grazie alle regolazioni del telaio (larghezza, profondità), dei portapedane, dei poggiapiedi e possibilità di scelta tra diversi cuscini, pelotte toracali, poggianuca/poggiatesta e svariati accessori/optional posturali.

**Rea Azalea family:** una risposta a tante esigenze posturali.

**Indicazione sul tipo di schienale e su come deve essere regolata la seduta in base alla fisicità del paziente.**

Scocca (Tensionabile)	Scocca (Tensionabile)	Scocca Tensionabile	Scocca (Tensionabile)	(Scocca) Tensionabile	(Scocca) Tensionabile	(Scocca) Tensionabile	Tensionabile	Tensionabile	(Scocca) Tensionabile
<b>Statura bassa</b>	<b>Statura alta</b>	<b>Corporatura normale</b>	<b>Fianchi larghi</b>	<b>Torace largo</b>	<b>Bacino largo</b>	<b>Addome ipertrofico</b>	<b>Glutei ipertrofici</b>	<b>Cifotico</b>	<b>Schiena ad S</b>
Seduta più chiusa possibile	Schienale alzato, seduta allungata	Schienale e sedile in posizione normale	Schienale e seduta allargati	Parte superiore dello schienale allargata, seduta ristretta	Parte inferiore dello schienale e della seduta allargati	Schienale ruotato nella posizione di maggior spazio scapolare	Schienale ruotato nella posizione di maggior spazio a livello sacrale	Zona dorsale allargata, maggiore avvolgenza sulla zona pelvica	Zona pelvica più contenuta, altre zone adattate alla forma ad S

**Tipo di schienale**

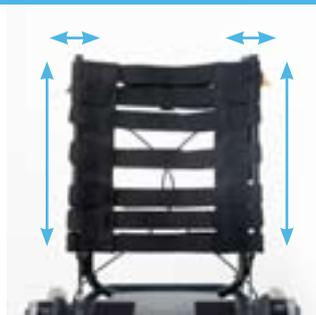

**Flex3: schienale tensionabile**  
Regolabile in altezza, larghezza in maniera simmetrica e non. Possibilità di ruotarlo di 180° e di angolare singolarmente i tubi.



**Schienale tensionabile, regolazioni**  
Massima libertà di orientare in maniera indipendente i tubi dello schienale per seguire la forma del tronco.



**Flex3: schienale con scocca rigida**  
Regolazione in continuo dell'altezza. Regolabile in larghezza in maniera simmetrica e non.



**Flex3 al completo**  
Ampia scelta di soluzioni posturali per lo schienale tra cuscini e poggianuca/poggiatesta e pelotte toracali.



### Flex3: sempre più flessibile !

La ricerca di una migliore postura e di personalizzare la seduta sono aspetti fondamentali per persone adulte/anziane che trascorrono un tempo prolungato in posizione seduta o per pazienti con deficit neuromuscolari o neurologici. La risposta *Rea* si chiama Flex3: uno schienale semplice, comodo, efficace con svariati opzioni/accessori posturali e che può accogliere anche sistemi posturali su misura.

### Basculamento e reclinazione

*Rea Azalea* e *Rea Azalea Assist* possono basculare la seduta fino a 25° e reclinare lo schienale fino a 30°. Entrambi i movimenti sono indipendenti e la loro combinazione permette di raggiungere i 55° così da scaricare meglio le pressioni sul tronco e offrire una posizione più comoda al paziente. Opzione: movimenti elettrici, anziché pneumatici, gestiti tramite pulsantiera.

### Caratteristiche e opzioni



**Rea Azalea**  
Autospinta, indicata per chi ha una ridotta capacità motoria ed una residua tonicità muscolare per l'autospinta.



**Rea Azalea Assist**  
Da transito, specifica per chi necessita dell'aiuto da parte all'accompagnatore nella spinta.



**Regolazioni elettriche (optional)**  
Basculamento seduta e reclinazione schienale comandati da pulsantiera.

Per la gamma completa di accessori previsti su *Rea Azalea* consultare la brochure "Opzioni/Accessori Rea"

### Dati tecnici

<b>Rea Azalea &amp; Azalea Assist</b>	390/440/490 mm + 50 mm 390/400/490 mm + 50/100 mm	430 - 500 mm	400/450 mm (450 mm)	Scocca: 560-790 mm Tensionabile: 540-715 mm	Regolabile L seduta L + 50 mm L + 100 mm	240 - 360 mm  330 - 440 mm
<b>Rea Azalea &amp; Azalea Assist</b>	da +1° a 25° (da -1° a 23°)	0°-30°	L + 220 mm (L + 230 mm)	1050-1250 mm 950-1020 mm	34 kg (con L 440 mm)	Max 135 kg
	<b>Rea Azalea e Rea Azalea Assist</b> soddisfano i requisiti della ISO 7176-19. Attenzione alle limitazioni che si applicano agli accessori. Per informazioni dettagliate sul trasporto a bordo di veicoli e per ulteriori informazioni pre-vendita relative a questo ausilio, si prega di consultare le pagine sul sito <a href="http://www.invacare-rea.com">www.invacare-rea.com</a> nella sezione Rea wheelchairs/Technical downloads.					
<b>Rea Azalea &amp; Azalea Assist</b>	Crash-tested ISO 7176-19					

Codici NT (suggeriti per la conf. standard): **18.09.39.006** + 18.09.39.021 +/.036 + /.103 + /.133 + /.136 + /.169 + codici ISO aggiuntivi  
Nr. Repertorio DM: **87798/R** (Azalea, Azalea Assist, Azalea Minor, Azalea Tall)

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL PRESCRITTORE.

### PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

### Colori telaio



Grigio



Blu ottanio



Sabbia  
(speciale)



Rosso  
(speciale)



Verde elettrico  
(speciale)



Dartex TR26/  
Grigio scuro



Felpato/  
Grigio scuro

### Tipo/Colore fodera



**Caratteristiche e opzioni**

**Rea Azalea Minor**

Modello ad autospinta o da transito dalle dimensioni ridotte e con una larghezza seduta da 340 mm (allargabile a 390 mm o 440 mm tramite spostamento dei braccioli). Ideale per gestire adulti con corporatura minuta, bambini o adolescenti con patologie neurologiche dell'età evolutiva che trascorrono molto tempo in posizione seduta e che hanno bisogno di poter variare la postura del tronco.

**Piccola e personalizzabile**

Il telaio è più corto di 30 mm e seduta meno profonda di 50 mm rispetto alla versione normale. Stesse funzionalità e regolazioni della "sorella" maggiore. Dotata del sistema D.S.T. e dello schienale Flex2 a scelta tra scocca rigida o tensionabile (novità), grande personalizzazione della seduta tramite vari accessori/aggiuntivi posturali.



**Rea Azalea Minor**  
Esempio di configurazione con poggianuca e vassoio ribaltabile.



**Schienale tensionabile Flex2**  
Alternativo alla scocca rigida. Indicata per pazienti con cifosi o gibbosità da compensare.



**Nuovi colori del telaio**  
Blu ottanio, sabbia, giallo fluorescente (in foto) e rosso.



Per la gamma completa di accessori previsti su **Rea Azalea Minor** consultare la brochure "Opzioni/Accessori Rea"

**Dati tecnici**

<b>Rea Azalea Minor</b>	340 mm + 50/100 mm	380 - 450 mm	400/450 mm	550 - 650 mm	240 - 360 mm	330 - 440 mm
<b>Rea Azalea Minor</b>	0°-30°	L + 220 mm (L + 230 mm)	900 - 1250 mm	900 - 970 mm	32 kg	Max 75 kg Peso x trasporto: 14,5 kg



Crash-tested ISO 7176-19

**Rea Azalea Minor** soddisfa i requisiti della ISO 7176-19. Attenzione alle limitazioni che si applicano agli accessori. Per informazioni dettagliate sul trasporto a bordo di veicoli e per ulteriori informazioni pre-vendita relative a questo ausilio, si prega di consultare le pagine sul sito [www.invacare-rea.com](http://www.invacare-rea.com) nella sezione Rea wheelchairs/Technical downloads.

Codici NT (suggeriti per la conf. standard): **18.09.39.006** + 18.09.39.021 + /036 + /103 + /133 + /136 + /169 + codici ISO aggiuntivi  
Nr. Repertorio DM: **87798/R** (Azalea, Azalea Assist, Azalea Minor, Azalea Tall)


CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL PRESCRITTORE.

**PRODOTTI COMMERCIALIZZATI**

**Colori telaio**



**Tipo/Colore fodera**

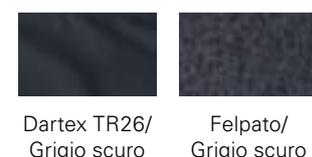



### Rea **Azalea Tall**

Caratterizzata da un telaio allungato di 50 mm e da una seduta più alta e più profonda di 50 mm, **Rea Azalea Tall** è indicata per gestire persone di statura elevata. Stesse funzionalità, regolazioni e piena compatibilità con accessori e optional di **Rea Azalea**. Disponibile sia nella versione ad autospinta che da transito.

### Grande gestione del tronco

Anche **Rea Azalea Tall** monta il nuovo schienale Flex3, quindi massima versatilità nella gestione posturale del tronco con la possibilità di montare anche sistemi complessi e su misura grazie ai tubi tondi dello schienale. Basculamento seduta fino al 25° e reclinazione schienale fino a 30° gestite da pistoni pneumatici o da motori elettrici (optional).

### Caratteristiche e opzioni



**Rea Azalea Tall (transito)**  
Versione da transito con schienale tesnionabile e poggiatesta con alette parietali.



**Rea Azalea Tall (autospinta)**



**Pedane elevabili**

Con compensazione in lunghezza e poggiatesta articolati (flesso estensione e profondità).

Per la gamma completa di accessori previsti su **Rea Azalea Tall** consultare la brochure "Opzioni/Accessori Rea"

### Dati tecnici

<b>Rea Azalea Tall</b>	390/440/490 mm + 50 mm 390/400/490 mm + 50/100 mm	480 - 550 mm	500 mm	Scocca rigida: 560 - 790 mm Tensionabile: 540 - 715 mm	Regolabile L seduta L + 50 mm L + 100 mm	240 - 360 mm	330 - 490 mm
<b>Rea Azalea Tall</b>	da +1° a 25° (da -1° a 23°)	0°-30°	L + 220 mm (L + 230 mm)	1100 - 1300 mm	950 - 1070 mm	34 kg (con L 440 mm)	Max 135 kg



Crash-tested  
ISO 7176-19

**Rea Azalea Tall** soddisfa i requisiti della ISO 7176-19. Attenzione alle limitazioni che si applicano agli accessori. Per informazioni dettagliate sul trasporto a bordo di veicoli e per ulteriori informazioni pre-vendita relative a questo ausilio, si prega di consultare le pagine sul sito [www.invacare-rea.com](http://www.invacare-rea.com) nella sezione Rea wheelchairs/Technical downloads.

Codici NT (suggeriti per la conf. standard): **18.09.39.006** + 18.09.39.021 + /036 + /103 + /133 + /136 + /169 + codici ISO aggiuntivi  
Nr. Repertorio DM: **87798/R** (Azalea, Azalea Assist, Azalea Minor, Azalea Tall)

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL PRESCRITTORE.

**PRODOTTI COMMERCIALIZZATI**

### Colori telaio



Grigio



Blu ottanio



Sabbia  
(speciale)



Rosso  
(speciale)



Verde elettrico  
(speciale)

### Tipo/Colore fodera



Dartex TR26/  
Grigio scuro



Felpato/  
Grigio scuro



**Rea Azalea Max**

Telaio rinforzato con portata fino a 180 kg, seduta da 550 mm o 610 mm allargabile tramite spostamento dei braccioli di + 50 mm o + 100 mm. Seduta regolabile in profondità, portapedane allargabili, elevabili con compensazione in lunghezza, sistema D.S.T. per ottenere il migliore assetto posturale nel caso di pazienti bariatrici.

**Fino a 180 kg di portata**

Schienale tensionabile Flex2 per gestire gibbosità o problematiche posturali del tronco. Ruotabile di 180° per dare più spazio alla zona sacrale (glutei ipertrofici) o alla parte dorsale. Poggiatesta unico convertibile a separato, poggiatesta maggiorati ed articolati, braccioli rinforzati. Disponibile sia nella versione ad autospinta che da transito.

**Caratteristiche e opzioni**



Rea Azalea Max



**Schienale reversibile Flex2**

Può essere montato in modo da creare maggior spazio a livello sacrale o dorsale.



**Poggiatesta convertibile e poggiatesta articolati**

La parte centrale del poggiatesta può essere rimossa. I poggiatesta sono multiregolabili.

**Dati tecnici**

<b>Azalea Max</b>	500/610 + 50 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	600 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 440 mm	1° - 20°
<b>Max Assist</b>	550/610 + 100 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	600 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 440 mm	1° - 20°
<b>Azalea Max</b>	0°-30°	L + 250 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1120 mm	54 kg	33 kg	max. 180 kg
<b>Max Assist</b>	0°-30°	L + 220 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1120 mm	54 kg	37 kg	max. 180 kg

Rea Azalea Max soddisfa i requisiti della ISO 7176-19. Attenzione alle limitazioni che si applicano agli accessori. Per informazioni dettagliate sul trasporto a bordo di veicoli e per ulteriori informazioni pre-vendita relative a questo ausilio, si prega di consultare le pagine sul sito [www.invacare-rea.com](http://www.invacare-rea.com) nella sezione Rea wheelchairs/Technical downloads.

Codici NT (suggeriti per la conf. standard): **18.09.39.006** + 18.09.39.021 + /.033 + /.103 + /.133 + /.136 + /.169 + codici ISO aggiuntivi  
 Nr. Repertorio DM: **301697/R** (Azalea Max)

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCEBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL PRESCRITTORE.  
**PRODOTTI COMMERCIALIZZATI**

**Colori telaio**



**Tipo/Colore fodera**



Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.

Rea Azalea Family - IT - 03/2012



**Yes, you can.®**